

# 喵不湿疏水猫砂 使用说明书



## 一、使用前准备

1. 使用前**请将猫砂盆彻底清洗干净并完全擦干**，不要残留任何清洁剂，以确保尿液样本不被污染。
2. 本产品为不吸水型（或疏水型）猫砂，尿液将停留在砂面或流至盆底，便于采集。**请务必使用干净、干燥的猫砂盆，不可混用普通猫砂。**

## 二、采集操作

1. **请勿将本产品与任何普通猫砂、除臭粉、除臭喷雾等混合使用**，以免影响尿液样本的纯度及后续检测结果。
2. 猫咪排尿后，尿液通常停留在砂面或流至盆底，**请使用干净的滴管或采集容器收取尿液**，尽量避免沾到猫砂颗粒。

说明：采尿专用猫砂使用后，尿液会留在砂面，用附带滴管即可轻松采集。普通带香精或添加剂的猫砂会污染样本，不适合用于尿液检测。

## 三、尿液样本的保存与检测

1. 采集到的尿液样本若无法在**1小时内进行后续检测**，冷藏可延缓样本变质，但检测前需回温。
2. **请勿将尿液样本放置在阳光直射或高温环境中。**

## 四、安全与卫生

1. 清理猫砂后请务必洗手，禁止儿童接触本产品。
2. 请勿将猫砂与猫粮、食碗和水碗放置过近。
3. 猫砂虽已通过 SGS 安全测试，但其中的粉尘仍可能引发少数人体呼吸道不适或过敏反应，使用过程中建议佩戴口罩并及时清理。

## 五、存储与保质

1. 未使用部分**请密封存放于阴凉、干燥处**，避免受潮失效。
2. 开封后建议在有效期限内使用完毕，以保证采集效果。
3. 请勿存放在温度超过 25°C 的环境中，避光保存。

## 六、猫咪适应与行为

1. 本产品颗粒质地可能与普通猫砂不同，猫咪初次接触时可能会出现排斥现象。
2. 请将猫砂盆放置在安静、隐蔽、干燥通风的位置，远离猫咪的食碗、水碗和睡眠区域。
3. 猫砂铺设厚度建议 3-5 厘米，过薄可能导致尿液无法有效留存在砂面。

说明：很多猫咪拒绝如厕的原因是猫砂盆摆放位置或猫砂种类不适合。逐步换砂可以减少猫咪对新猫砂的排斥。

## 七、诊断与提醒

1. 本产品仅用于协助收集尿液样本，不具任何医疗诊断与治疗效能。
2. 如您通过尿样的颜色、气味等观察到猫咪可能存在的健康问题，请及时咨询专业兽医。
3. 本产品采集的尿液样本**不适合做微生物培养**，如需进行细菌培养检测，建议采用膀胱穿刺采样方式。

说明：使用本疏水猫砂自然采集的尿样**不适合做微生物培养**，因为样本可能与猫砂和环境中的细菌接触而受污染。

## 八、常见问题与回复

问题	回复
安全性如何？	已通过 SGS 多项检测，报告显示本品安全、无毒。 检测项目包括双酚 A/毒性元素/甲醛/增塑剂等成分检测、皮肤刺激性/腐蚀性试验、急性眼刺激性/腐蚀性试验、经口急性毒性试验等。 可洽询客服取得 SGS 检测报告书。
是否影响检测结果	不影响后续尿液检查项目，但不包含细菌（微生物）培养。
能否做细菌（微生物）培养或药敏试验	样本可能与猫砂和环境中的细菌接触而受污染，不建议做细菌（微生物）培养或药敏试验。
能否多次重复使用	本产品主要用于尿液采集用途，多次重复使用可能会造成样本交叉污染影响后续检测结果。
使用后如何丢弃	本产品为天然砂砂成分，可按一般废弃物丢弃处理。